

Wypełniacze Juvéderm ULTRA

zastosowanie w estetyce



Czym jest Juvéderm® ULTRA?


- Nowa generacja wypełniaczy na bazie HA.
- Zapewnia gładkie, długotrwałe wypełnienie zmarszczek statycznych i fałdów skórnych twarzy z dodatkową hydrofilnością.
- Dzięki zastosowaniu zaawansowanej matrycy 3D HA, żel jest gładki w użyciu i bardzo trwały (rezultaty do 12 miesięcy).
- Zawiera środek miejscowo znieczulający – lidokainę (0.3%) by zwiększyć komfort użycia dla pacjenta.
- Różnorodność postaci pozwala na zastosowanie od zmarszczek płytkich do wolumetrii w okolicach policzków i brody.




Rodzina Juvéderm® ULTRA: spełnienie potrzeb

Juvéderm® ULTRA cecha	Wynik	Korzyść
Matryca 3D kwasu hialuronowego (HA)	<ul style="list-style-type: none"> • Wyższa koncentracja HA • Spójna struktura żelu wykazuje lepsze właściwości wolumetryczne • Unikalna, gładka struktura zapewnia łatwość iniekcji • Bardziej odporny na degradację • Lepsza precyzja podania, brak potrzeby „dostrzykiwania” 	<ul style="list-style-type: none"> • Skutecznie zwiększa objętość skóry • Efekt finalny jest widoczny natychmiast po iniekcji – bez konieczności dodawania preparatu • Przewidywalne, łatwe do osiągnięcia rezultaty • Mniejsza siła nacisku potrzebna do wykonania iniekcji • Skuteczny w długim okresie ale nie permanentny • Zapewnia naturalny wygląd
Zawiera 0,3% lidokainy	<ul style="list-style-type: none"> • Delikatny zabieg, ze zminimalizowanym bólem 	<ul style="list-style-type: none"> • Więcej pacjentów chętnych do zabiegu i do powrotu na kolejne zabiegi
Niski poziom uczuleń oraz działań niepożądanych	<ul style="list-style-type: none"> • Dobrze tolerowany 	<ul style="list-style-type: none"> • Wzbudza zaufanie lekarzy i pacjentów
Juvéderm® ULTRA – trzy różne postacie	<ul style="list-style-type: none"> • Różnorodność wyboru 	<ul style="list-style-type: none"> • Można stosować u różnych pacjentów i w różnych wskazaniach.


Dlaczego wysoki poziom usieciowania jest ważny?

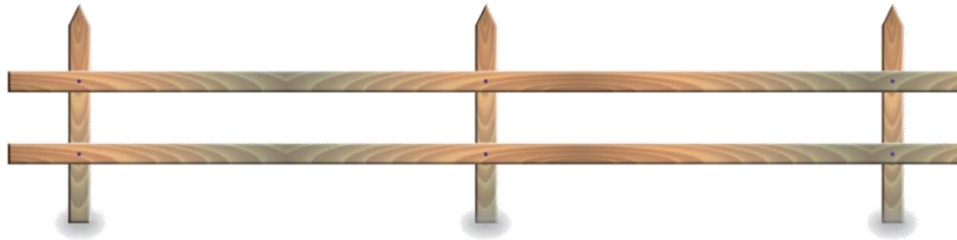

Struktura łatwa do
przerwania

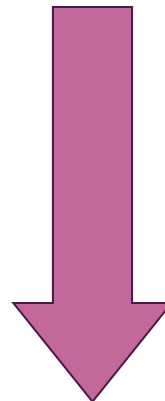

Dodanie większej ilości wiązań

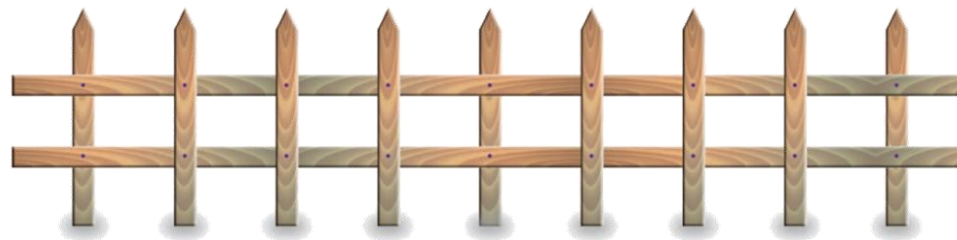


Struktura bardziej stabilna

Korzyści usieciowania do matrycy 3D HA

- Skutecznie i długotrwale uzupełnia braki objętości skóry
- Charakteryzuje się bardzo gładką strukturą

Juvéderm® ULTRA

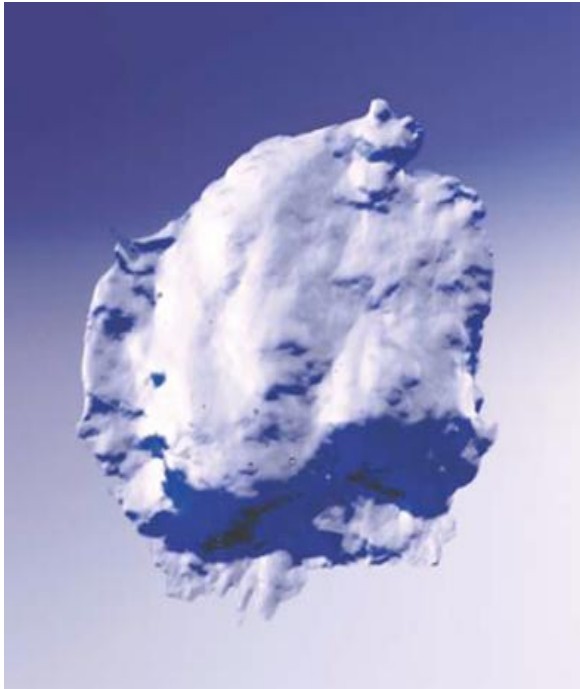

Struktura gładka


Zawiesina HA



Struktura granulkowa

Korzyści usieciowania do matrycy 3D HA

- łatwa i gładka iniekcja

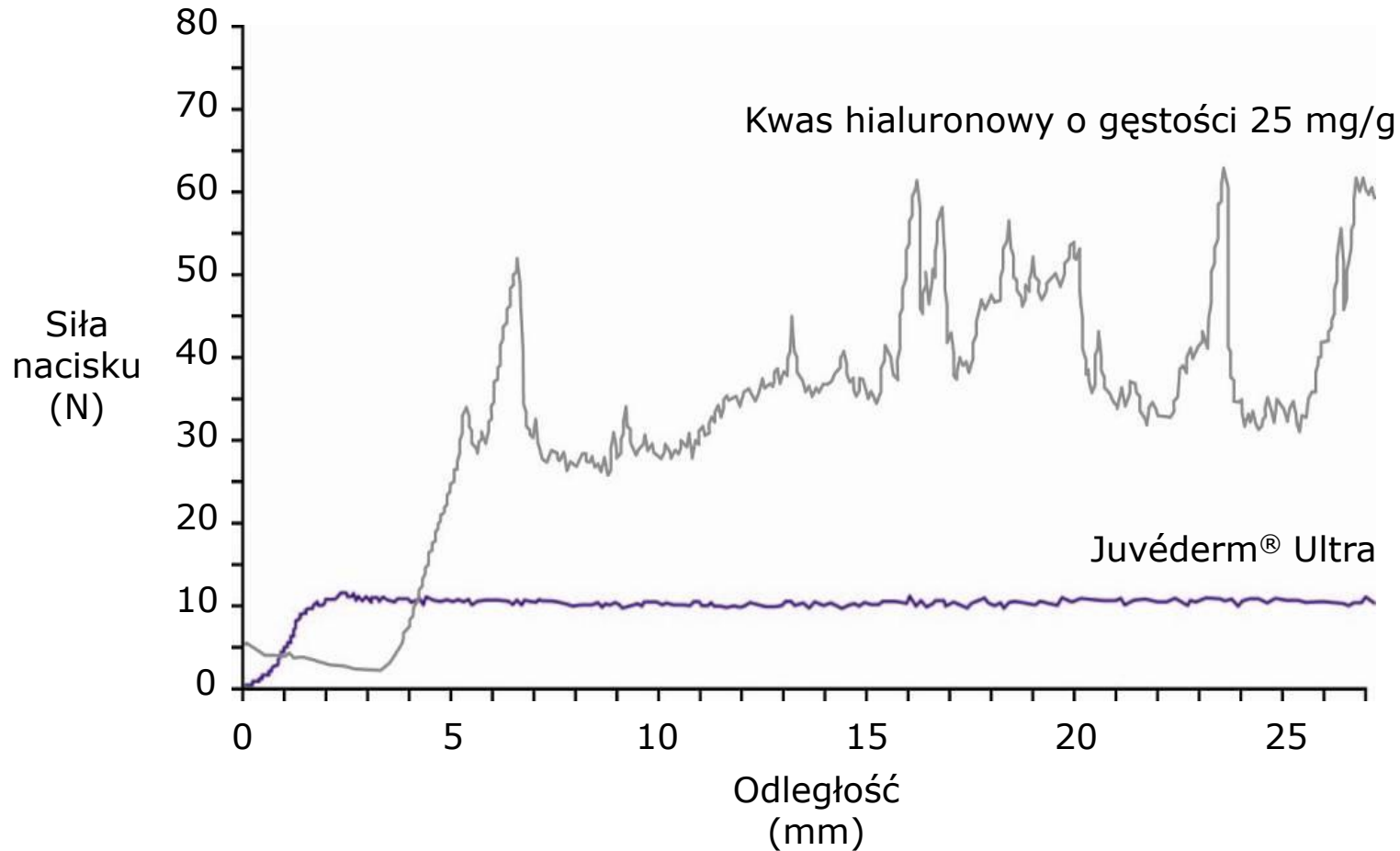

Korzyści usieciowania 3D HA – podsumowanie:

Juvéderm® ULTRA cecha	Wynik	Korzyść
Unikalny proces produkcji matrycy 3D kwasu hialuronowego	<ul style="list-style-type: none"> Wysoka koncentracja HA 	Skutecznie przywraca objętość skóry
	<ul style="list-style-type: none"> Wydłużony proces oczyszczania po sieciowaniu 	Usuwa zbędne cząsteczki substancji wiążącej – mniej działań niepożądanych
	<ul style="list-style-type: none"> Spójny żel działa jako bariera 	Finalny efekt wypełnienia jest widoczny tuż po zabiegu
	<ul style="list-style-type: none"> Gładka struktura i jednolita konsystencja 	Przewidywalne rezultaty, precyzja podania
	<ul style="list-style-type: none"> Jednolity w trakcie wyciskania 	Łatwość i wygoda podania
	<ul style="list-style-type: none"> Odporny na degradację 	Efekty są długotrwałe ale nie permanentne
	<ul style="list-style-type: none"> Precyzja przy niższych kosztach 	Większa liczba pacjentów osiągnie naturalny wygląd i pełną satysfakcję


Wygoda podawania przy optymalnej ilości

	Juvéderm® ULTRA 2*	Juvéderm® ULTRA 3*	Juvéderm® ULTRA 4*
Właściwości wolumetryczne	●●○○○	●●●○○	●●●●○
Zawartość opakowania	1.1ml (2 x 0.55ml)	1.1ml (2 x 0.55ml)	1.6ml (2 x 0.8ml)
Rodzaj dołączonej igły	30G 1/2	27G 1/2	27G 1/2
Zastosowanie	Średnie zagłębienia skórne, podkreślanie konturu ust	Średnie i głębokie zagłębienia skórne, zwiększanie objętości ust i podkreślenie konturu warg	Głębokie zagłębienia skóry, zwiększanie objętości ust oraz policzków



* Usieciowany kwas hialuronowy (pochodzenia biosyntetycznego) + 0,3% lidokainy.

Juvéderm® ULTRA – możliwości zastosowania:

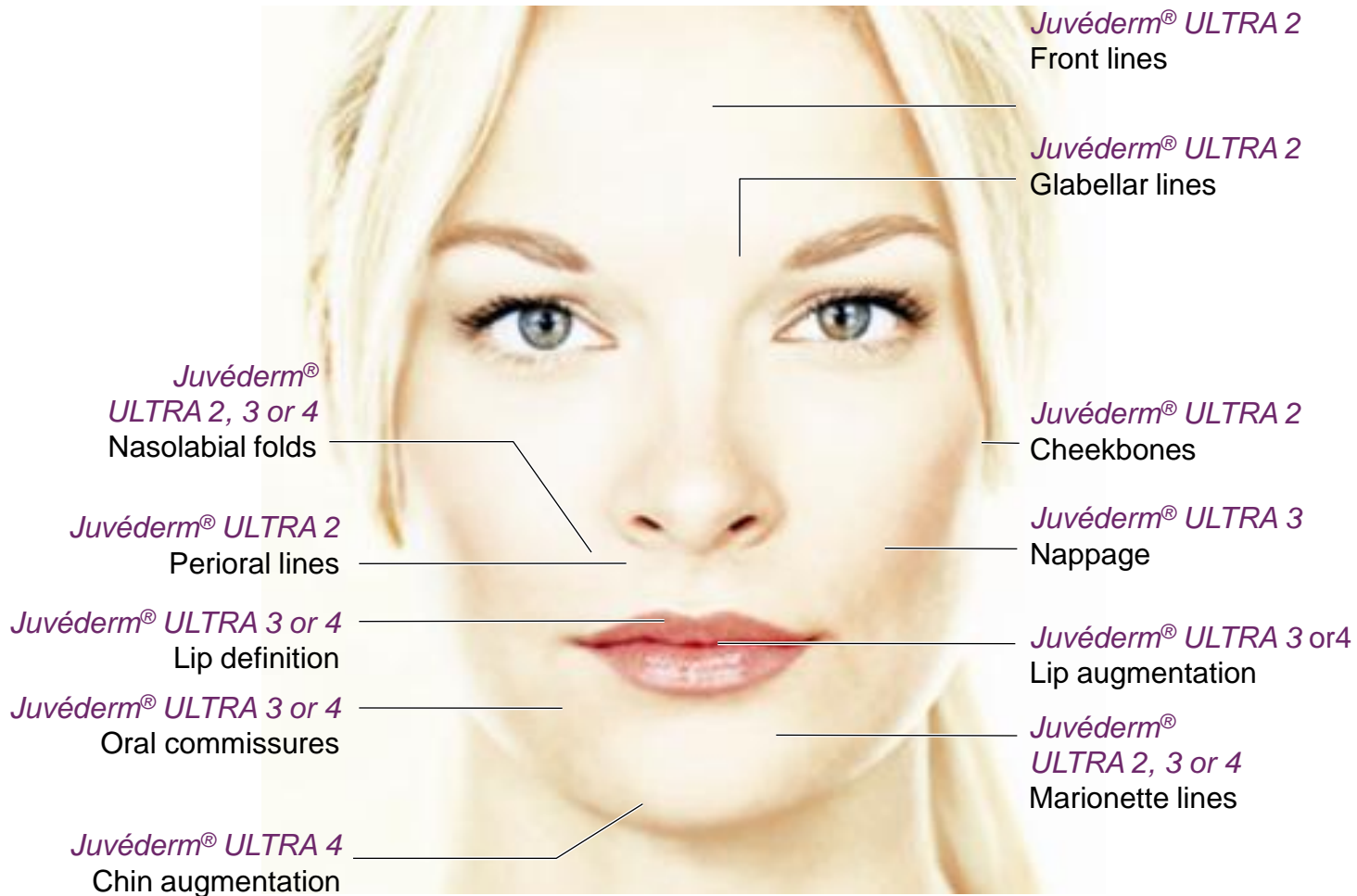

Zalecenia dot. stosowania wypełniaczy na bazie HA

Opieka po zabiegu

Po wykonaniu iniekcji preparatem Juvéderm® ULTRA:

- lekarz może rozmasować okolicę w którą podano wypełniacz, by wygładzić nierówności lub zapełnić luki
- można przyłożyć zimny kompres na miejsce iniekcji by zredukować obrzęk
- pacjent może powrócić do normalnych aktywności gdy tylko ma na to ochotę
- przy przerwaniu naczynka może pojawić się niewielki siniak
- wizyta kontrolna powinna nastąpić po 2-4 tygodniach
- w przypadku podania zbyt dużej ilości preparatu można zastosować enzym hialuronidazy

Podsumowując: Juvederm ULTRA jest dobrze tolerowany, redukuje lub zupełnie znosi ból, może być używany u różnych osób w różnych wskazaniach

Juvederm® ULTRA właściwość	Skutek	Korzyści
Zawiera 0,3% lidokainy	Komfortowy zabieg o bardzo małym lub żadnym stopniu bólu	Większa liczba pacjentów będzie skłonna spróbować terapii do której się przekona
Znikomy odsetek reakcji alergicznych i działań niepożądanych	Dobrze tolerowany u różnych pacjentów	Budzi zaufanie i daje długoterminową satysfakcję dla pacjenta
Juvederm® ULTRA – rodzina wypełniaczy	Różnorodność form i zastosowania	Możliwości wyboru dla lekarza i pacjenta

Juvéderm™: udokumentowana skuteczność

W badaniu typu follow-up

- 8 z 10 pacjentów, u których wcześniej zastosowano Juvéderm™ zostało ponownej iniekcji
- Poprawa którą odnotowano za pierwszym razem, utrzymywała się przez kolejne min. 9 miesięcy u 75% pacjentów.




Zdjęcia bez retuszu – uczestnik badania

Juvéderm® ULTRA: naturalne piękno bez bólu i pełna satysfakcja pacjenta

Powiększenie i poprawa konturu ust

Fałdy nosowo-wargowe

Przed zast.
Juvéderm®
ULTRA

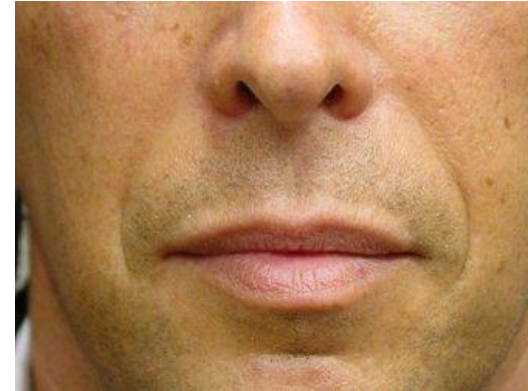

Po zast.
Juvéderm®
ULTRA



Rodzina wypełniaczy Juvéderm® ULTRA – podsumowanie:

- Wysokie stężenie kwasu hialuronowego w prep. Juvéderm® ULTRA optymalizuje ich właściwości wolumetryczne (24 mg/g)
- Unikalna, trójwymiarowa matryca 3D HA zapewnia gładką i w pełni kontrolowaną iniekcję
- Prep. Juvéderm® ULTRA zawierają 0,3% lidokainy, co znacznie podwyższa komfort zabiegu dla pacjenta oraz pośrednio lekarza
- Lepsza kontrola zabiegu oraz mniejszy ból znacznie poprawiają precyzję podania i osiągnięcie optymalnego efektu estetycznego
- Juvéderm® ULTRA 2, 3, oraz 4 differ różnią się gęstością usieciowania i zdolnościami wolumetrycznymi – można je stosować w różnych wskazaniach u różnych pacjentów.
- Juvéderm® ULTRA może być stosowany w połączeniu toksyną botulinową w trakcie jednej sesji – by osiągnąć holistyczny efekt estetyczny.